

NPU 01 505; Pro-vitamin A; beta-Caroten

<b>Indikation</b>	Vitamin A status. Mistanke om malabsorption.
<b>Prøvemateriale</b>	Blod i glas uden antikoagulans (tørglas)
<b>Analysemateriale</b>	5 ml serum  Prøven skal beskyttes mod lys. P-Retinoler og P-alfa-Tocopherol kan udføres på samme prøve.
<b>Forsendelse</b>	Afpipetteret serum med almindelig post  1 måned ved 4°C; 2 år ved -20°C
<b>Laboratorium</b>	Unilabs
<b>Svartid</b>	1 - 2 uger
<b>Referenceinterval</b>	0,16 - 1,10 µmol/L
<b>Fortolkning</b>	Forhøjede værdier ses ved medikamentel overdosering og nyreinsufficiens.  Lave værdier ses ved ensidig, fedtfattig kost og ved mangelfuld fedtabsorption (fx ved sygdomme i pancreas, lever, galdeveje og tyndtarm). Lave værdier kan også ses ved thyroidea og nyresygdomme.  Se også P-Retinoler.  Se evt <a href="http://www.unilabs.dk">www.unilabs.dk</a>

Revideret: 14-02-2011

