

P - Hemoglobin (Fe)

Stofkoncentration (µmol/L)

NPU 02 322; Plasmahæmoglobin; Frit hæmoglobin i plasma

Indikation	Mistanke om hæmolyse (påviser frit hemoglobin i plasma).
Prøvemateriale	Blod i lithium-heparin-rør Prøven skal centrifugeres 10 min ved 4.000 omdr/min uden bremse. Hvis analysen ikke udføres straks efter centrifugering, skal plasma opbevares ved 4°C .
Analysemateriale	1,5 ml plasma
Forsendelse	Ikke relevant
Holdbarhed	3 døgn ved 4°C
Laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
Svartid	Samme dag
Referenceinterval	< 3 µmol/L
Fortolkning	Forhøjede værdier ses ved intravaskulær hæmolyse, fx efter transfusion med uforligeligt blod, ved paroksysk nocturn hæmoglobinuri, kuldeagglutininsyndrom, malariakriser, ekstrakorporal cirkulation og efter dialyse.

Godkendt: 07-05-2010

