

NPU 02 503; Antistof mod intrinsic factor

<b>Indikation</b>	Udredning af pernicios anæmi.
<b>Patientforberedelse</b>	Hvis patienten er i B12-behandling, ventes med prøvetagning til mindst 1 uge efter sidste vitamin B12-behandling.
<b>Prøvemateriale</b>	Blod i glas uden antikoagulans (tørglas) Tages med mindst mulig stase. Henstår 30 min. inden centrifugering.
<b>Analysemateriale</b>	1 ml serum
<b>Forsendelse</b>	Afpipetteret serum med almindelig post. Hvis modtagelse sker senere end 2 døgn efter prøvetagning, skal forsendelse ske frossen på tøris.
<b>Laboratorium</b>	Unilabs
<b>Svartid</b>	1 - 2 uger
<b>Referenceinterval</b>	Ikke påvist
<b>Fortolkning</b>	Antistoffer er normalt ikke påviselige, men ses hos ca 50 % af patienter med pernicios anæmi. Se evt <a href="http://www.unilabs.dk">www.unilabs.dk</a>
<b>Bemærkninger</b>	Analysen måler både type I (blokerende antistoffer) og type II (ikke blokerende antistoffer). Vedr forsendelse: Sendes med almindelig post hvis forsendelsestiden er < 2 døgn.

Revideret: 15-02-2011

