

F - Orm, ormelarver og -æg, cyster af protozoer

NPU 12 978

Indikation	Mistanke om ormeinfektion.
Patientforberedelse	Patienten må ikke have fået afføringsmidler eller røntgenkontrastmidler i dagene forud for undersøgelsen.
Prøvemateriale	<p>Fæces</p> <p>Til en generel undersøgelse skal anvendes prøver fra 3 forskellige afføringer, fra fæces' overflade og indre, og gerne med blodige eller slimede partier. Grødet fæces er mest velegnede og om nødvendigt kan gives et salinsk afføringsmiddel eller et klysma med isotonisk saltvand.</p> <p>Fyld fæcesrør med skruelåg halvt op med prøvematerialet. Hvis der er kvitteret orme (eller ormeled), som ønskes identificeret, skal materialet fikseres i 1% formalin og indsendes.</p> <p>Til undersøgelse for æg fra børneorm (oxyurer) anvendes analaftryk. Aftrykkes tages om morgenen, før vask og toiletbesøg. Der anvendes en træspatel omviklet med et stykke gennemsigtigt tape med klæbesiden udad. Spatlen trykkes mod anus, hvorefter tapen klæbes på et objektglas, så anusaftrykket findes midt på glasset. Tapen klippes til, så den ikke når ud over glassets kanter.</p>
Forsendelse	Materialet sendes med almindelig post
Holdbarhed	1 døgn ved 20°C; 3-4 døgn ved 4°C; ikke holdbar ved -20°C
Laboratorium	Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby
Fortolkning	Se besvarelse fra Parasitologisk Laboratorium, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby *) og evt Statens Serum Instituts håndbog.

*) www.auh.dk/sks/afd/afdq/dk/parasito.htm

Godkendt: 01-08-2007

